

ULTRACOVER®

Transösophageales Kit

Microtek Medical ist ein verlässlicher Partner für innovative Produktlösungen zur Risikominimierung und -vermeidung.

Ein komplettes Kit für transösophageale Echokardiographiesonden zum Einsatz bei Erwachsenen und Kindern.

Das Kit enthält einen ULTRACOVER®, eine mit Transmissionsgel gefüllte Spritze, einen Verlängerungstubus, ein Beißschutz und eine Befestigungshilfe.

www.microtekmed.com

 **MICROTEK™**
MEDICAL B.V.




1. Die Kappe entfernen und das Anschlussstück an der Spritze befestigen.



2. Die Latexhülle auf die Spritze schieben. Anschließend das Transmissionsgel in die Spitze der Hülle drücken.



3. Das Gel verteilen.

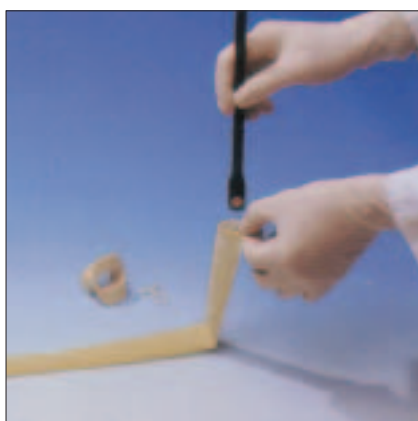

4. Den Umwandler in die Latexhülle schieben.



5. Die Latexhülle mithilfe der Drehverriegelung befestigen und den Beißschutz montieren.



6. Jetzt ist die Sonde einsatzbereit.

Artikelnr.	Beschreibung	Verkaufseinheit
86590	TEE-Sondenhülle 25/11/1000, gefaltet, steril	10
86602	TEE-Sondenhülle 25/11/1000, gefaltet	10
87602	TEE-Sondenhülle 25/11/1000 PU, gefaltet, steril	10
87106	TEE-Kit 25/11/1000, gefaltet, steriler Beißschutz, Gel, Verriegelung, Anschlussstück	12
86593	pädiatrisches TEE-Kit, gefaltet, steriler Beißschutz, Gel, Verriegelung, Anschlussstück	12
86599	TEE-Sondenhülle 32/10/1000, gefaltet	10